

4 x MEIKO Hygienepakete

Für Hygienesicherheit beim Umgang mit SARS-CoV-2

4 x
Aktions-
pakete zum
Vorzugs-
preis!

Auf Nummer sicher gehen! Wir zeigen Ihnen wie.

PD Dr. Dr. Friedrich von Rheinbaben, deutsches Hygieneinstitut HygCen, bestätigt: Reinigungs- und Desinfektionstechnik von MEIKO wirkt effizient gegen das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2). Dank unserer Erfahrung aus über 90 Jahren wissen wir, vor welchen Herausforderungen Sie und Ihr Haus derzeit stehen – und wollen Sie unterstützen. Sie möchten bei Reinigungs- und Desinfektionstechnik auf der sicheren Seite sein? Oder in einer Anwenderschulung Ihr Wissen über die hygienische Handhabung von Pflegegeschirr auffrischen? Wir begleiten Sie bei diesen Herausforderungen mit zielgerichteten Paketen für die Hygienesicherheit, die nun gefordert ist.



Sicheres noch sicherer machen



The clean solution

David Fisman, Epidemiologe der Universität Toronto, warnt: Die mögliche Übertragung von SARS-CoV-2 über Fäkalien stelle Krankenhäuser und Pflegeheime vor neue Herausforderungen. Der Erreger kann sich demnach bei mangelnder Hygiene über den fäkal-oralen Weg verbreiten. Eine Eindämmung der Viruserkrankung wird erschwert, da damit Patientengeschirre wie Steckbecken zu neuralgischen Punkten in der Infektionskette werden.

Zertifizierte Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2

Die Reinigungs- und Desinfektionsleistung der Steckbeckenspüler von MEIKO wurde vom unabhängigen Hygieneinstitut HygCen als besonders wirksam gegen SARS-CoV-2 eingestuft. Das Aufbereitungsverfahren in den Steckbeckenspülers von MEIKO ist sicher. Es gilt einige Parameter im Umgang mit gegebenenfalls kontaminiertem Spülgut einzuhalten.

Zudosierung alkalischer Reiniger im Warmwasserspülgang

Untersuchungen belegen die Wirksamkeit von Reinigern mit einem hohen Fett-Tragevermögen und heißen alkalischen Reinigungslösungen von 50 Grad Celsius und höher. Mit den MEIKO Produkten ist dies jederzeit möglich, da im Warmwasserspülgang ein alkalischer Reiniger zudosiert werden kann.

Einstellung eines A0-Werts von mindestens 600

Ein A0-Wert von 600 gilt als ausreichend zur Desinfektion von thermolabilen Viren wie Coronaviren.

Pflichtdosierung eines Klarspülers / Enthärterers

Klarspüler bzw. Enthärter besitzen eine zusätzlich zerstörende Wirkung auf Viren und werden gerade jetzt besonders empfohlen. Bei MEIKO Geräten kommen sie ohnehin zum Einsatz, um Kalkrückständen in der Maschine und Härtebelägen auf dem Spülgut vorzubeugen. Diese Parameter gelten, unabhängig davon ob das Kurz-, Normal- oder Intensivprogramm ausgewählt wurde.

Um Sie im Umgang mit SARS-CoV-2 bestmöglich zu unterstützen, haben wir spezielle Pakete geschnürt und vergünstigte Angebote mit ausgesuchten Chemie-Produkten für Sie ausgearbeitet.

Paket Neugerätekauf

Paket Add-on

Paket Chemie

Paket Academy

TOPIC oder TopLine Neugerät

Aktionspaket zum Vorzugspreis!



Für alle TOPIC und TopLine Geräte inkl.

- Reiniger- und Klarspüldosierung und Desinfektion A0=600
- Chemie-Paket 2 x 5 Ltr. SK22E und 2 x 5 Ltr. R 100
- **Wartungsvertrag** (optional) gemäß Medizinproduktegesetz / Betreiberverordnung

1x Reinigerdosiergerät

Aktionspaket zum Vorzugspreis!



Für alle TOPIC und TopLine Geräte inkl.

- Einstellung und Desinfektion A0=600
- Chemie-Paket 2 x 5 Ltr. SK22E und 2 x 5 Ltr. R 100
- **Wartungsvertrag** (optional) gemäß Medizinproduktegesetz / Betreiberverordnung

Doyen® Qualitätsprodukte

Aktionspaket zum Vorzugspreis!



- 10 x Klarspüler SK 22E, 5 Ltr.
- 10 x Reiniger R 100, 5 Ltr.
- inkl. **Umstellung und Einstellung der Dosierung** vor Ort

Anwenderschulung

Aktionspaket zum Vorzugspreis!



- Einweisung / Wiederholung für das Hygienepersonal
- Vermittlung von Hygienewissen
- Darstellung des idealen Reinigungs- und Desinfektionsprozesses
- Bedienung, Funktionen, Programme, Steuerung, Bedienfehler, Störmeldungen etc.

Senden Sie uns bei Interesse einfach das ausgefüllte Formular zu – wir melden uns umgehend bei Ihnen.
Aktionszeitraum: bis 30.04.2020 (solange Vorrat reicht)

MEIKO Deutschland GmbH

E-Mail: info.de@meiko.de

Name/Einrichtung

Kunde/Absender

Name/Einrichtung

MEIKO Kundennummer, falls bekannt

Straße

E-Mail

PLZ/Ort